


VERSION 6.1

OptiExpert™

Benutzerhandbuch

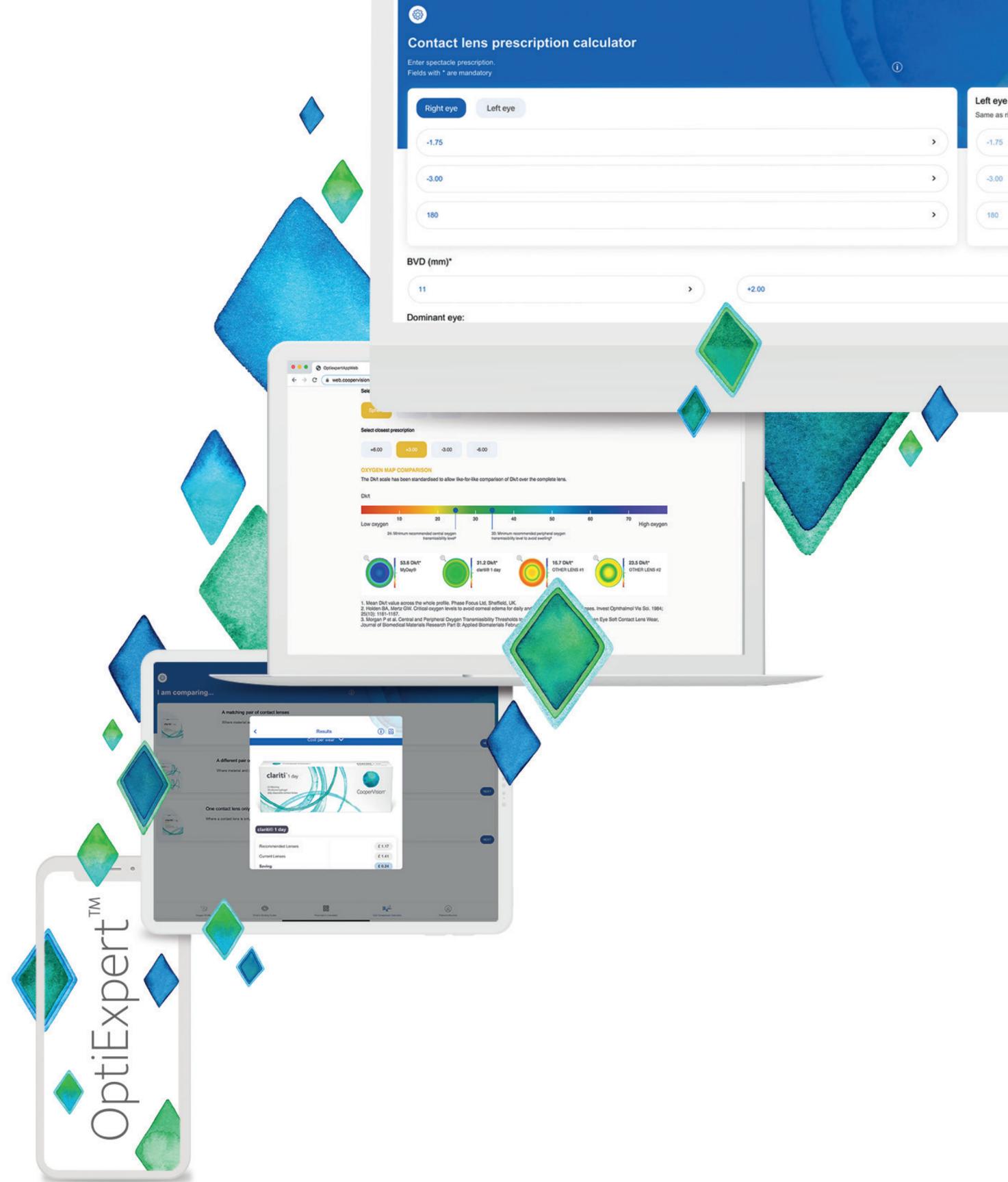

OptiExpert™ Online


OptiExpert™ ist für die Nutzung auf Desktop-/Laptop-Computern über einen Webbrowser sowie auf Smartphones/Tablets über die App konzipiert. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der verfügbaren Bildschirmfläche für jedes verwendete Gerät. Die Einrichtung von „Aufzeichnungen“ ist in OptiExpert™ online nicht verfügbar.

Um von Ihrem Smartphone/Tablet auf OptiExpert™ zuzugreifen, öffnen Sie Ihren App Store und suchen nach „optiexpert“.



Website: <https://coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/tools-und-rechner>

Klicken Sie hier

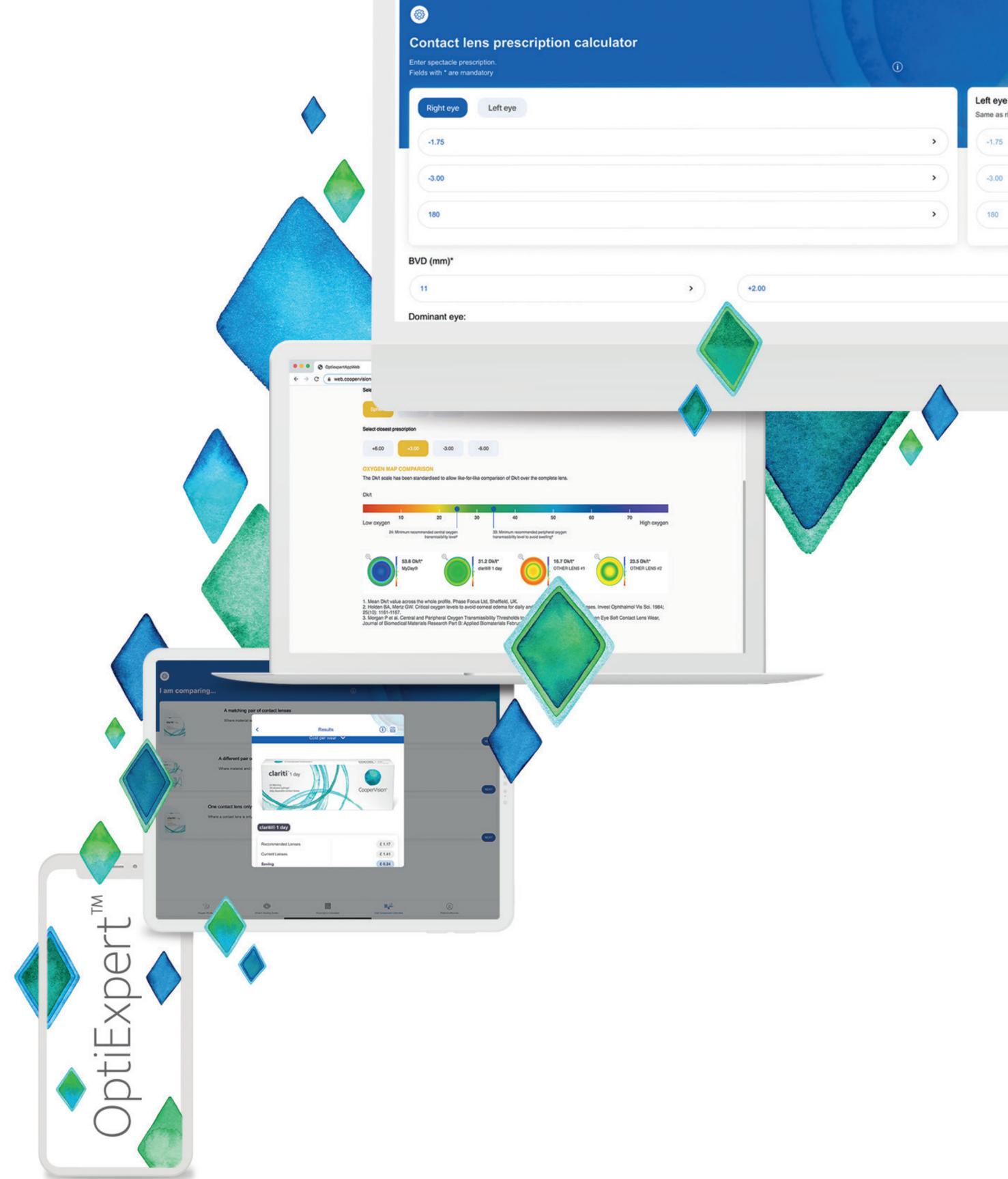



Einführung des OptiExpert™ der nächsten Generation


Die App für Kontaktlinsenspezialistinnen
und –spezialisten.

Intelligenter als je zuvor.
So können Sie noch mehr erreichen.


Hinweis: Dieses Handbuch verwendet Bilder von der mobilen Version dieser App.

OptiExpert™ ist ein Bildungs-, Referenz- und Informationsinstrument für Kontaktlinsenspezialistinnen und –spezialisten. Die Anwendung unterstützt die Kontaktlinsenspezialistinnen und –spezialisten bei der Bewertung der Kunden und Kundinnen, ersetzt aber nicht die klinische und fachliche Entscheidungsfindung. OptiExpert™ ist nicht vorgesehen als Alternative für eine medizinische oder optometrische Beratung, noch als Ersatz zu einer professionellen Bewertung der Kunden und Kundinnen.

1. Erste Schritte

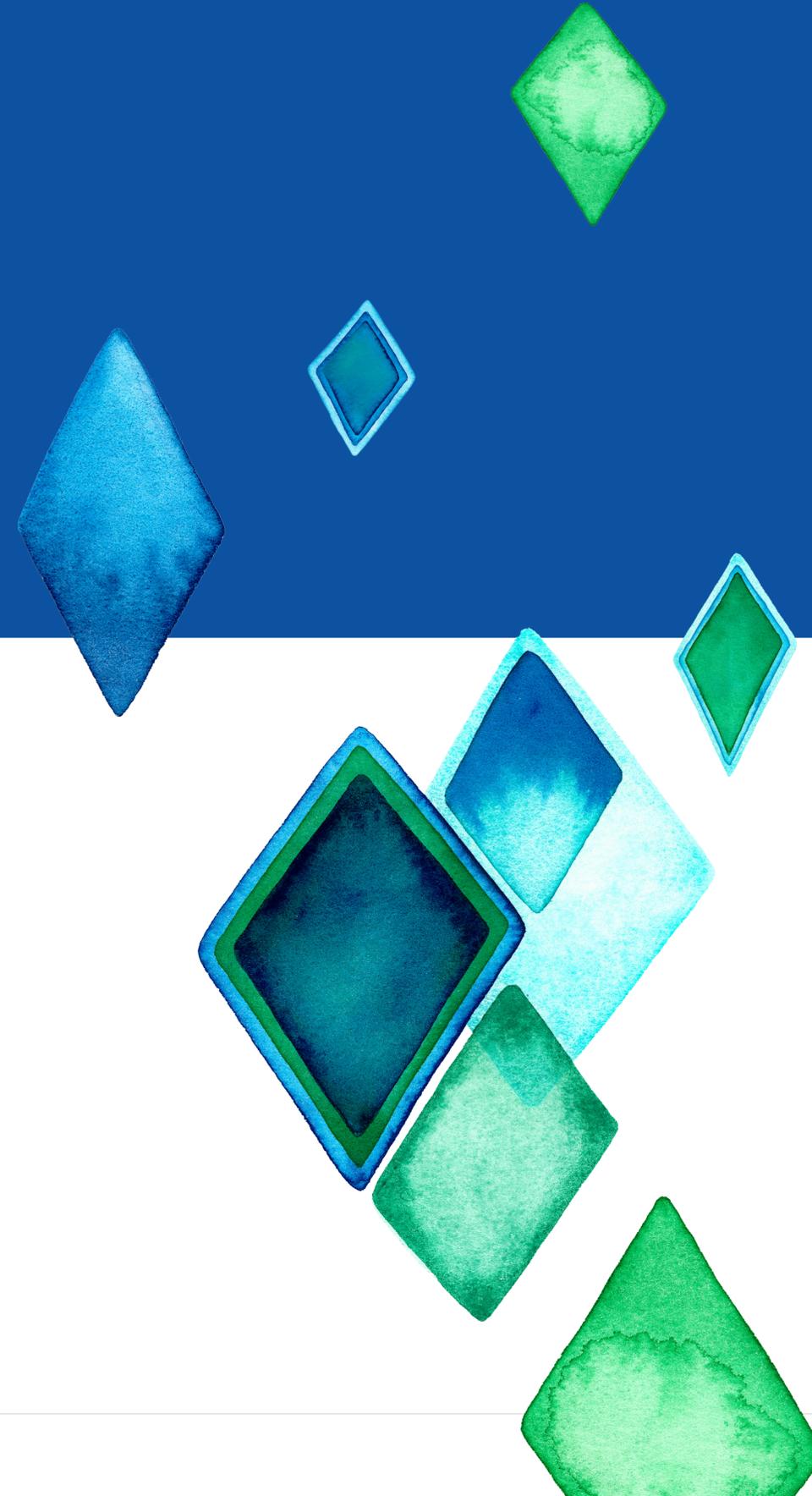

Erste Schritte

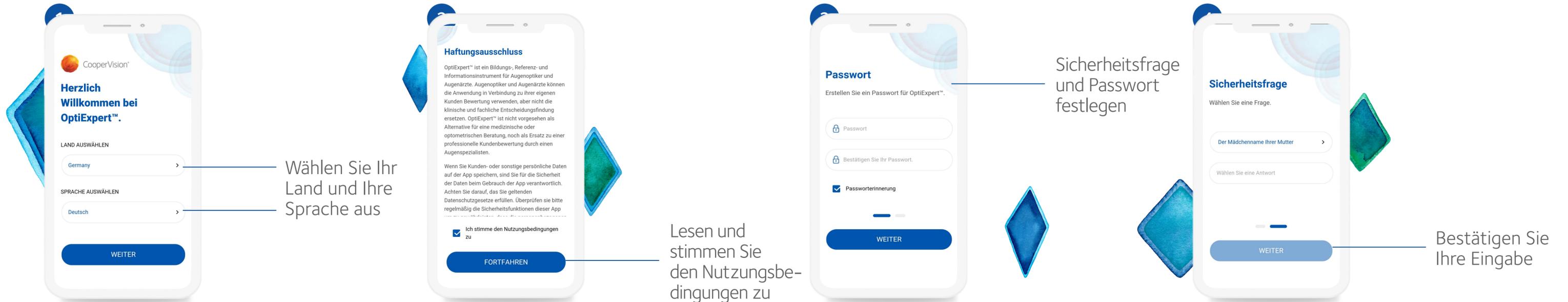


OptiExpert™ synchronisiert sich mit dem Online-Produktkatalog von CooperVision. Währenddessen wird ein blauer Bildschirm mit weißen Punkten in der Mitte angezeigt. Ihr Gerät sollte weiterhin mit dem Internet verbunden bleiben. Normalerweise dauert dieser Vorgang nur einige Sekunden bis wenige Minuten. Wenn Sie mehr als drei Minuten gewartet haben, dann schließen Sie OptiExpert™ komplett und starten ihn erneut.



OptiExpert™ der nächsten Generation kennenlernen

Beim ersten Start von OptiExpert™, werden Sie auf dem Display durch einige kurze Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten geführt.

Wenn OptiExpert™ beim letzten Mal nicht mit dem Online-Katalog synchronisiert wurde, dann wird dies jetzt erfolgen.

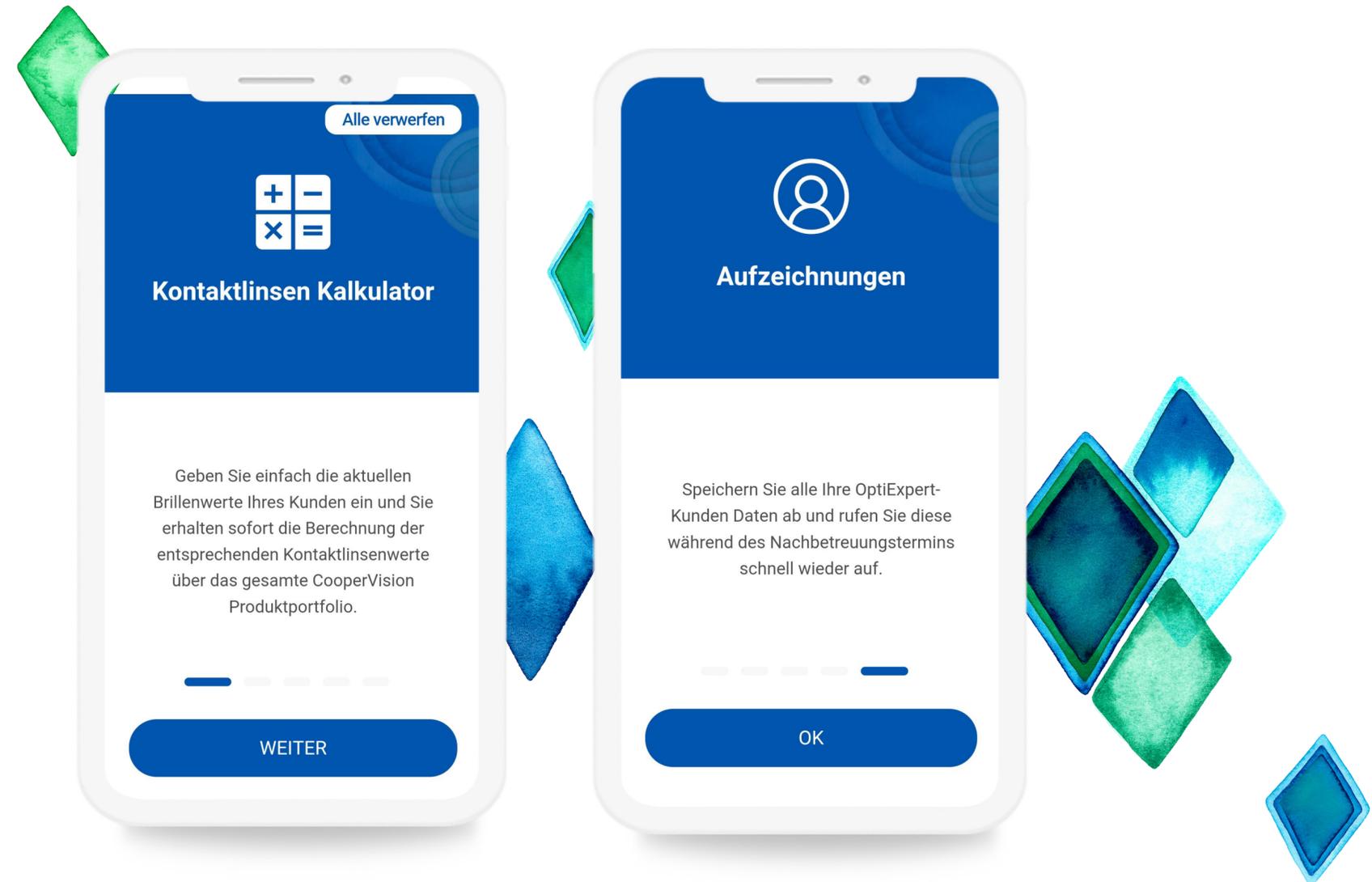


2. Intelligenter Kontaktlinsenkalkulator

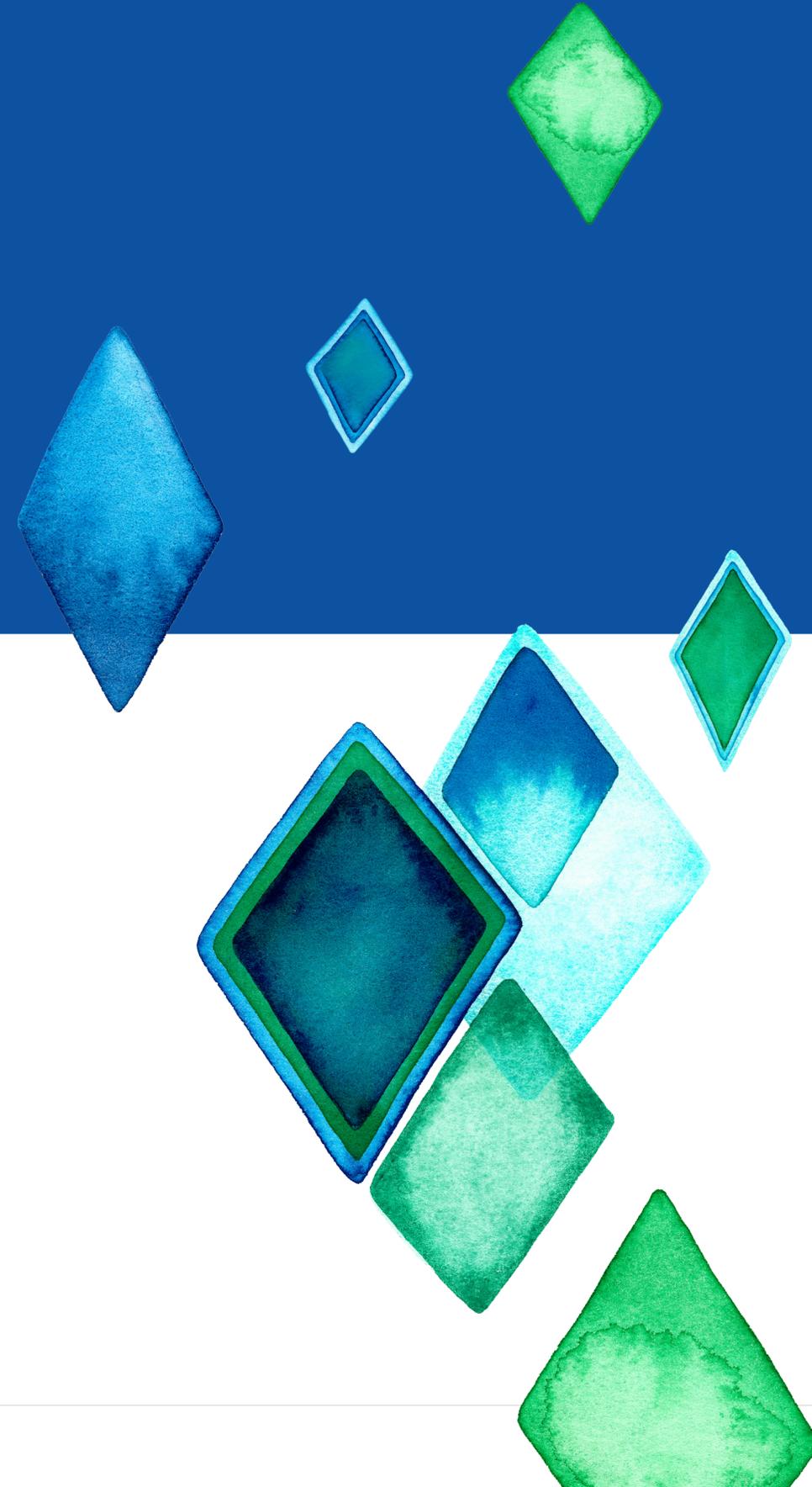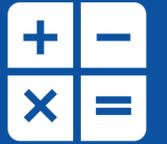


Intelligenter Kontaktlinsenkalkulator

Für die schnelle Berechnung und Bewertung von Kontaktlinsenwerten für ihre Kundinnen und Kunden mit Myopie, Hyperopie, Astigmatismus oder Presbyopie. Der intelligente Kontaktlinsenkalkulator von OptiExpert™ rechnet praktisch und einfach alle Brillenwerte in Kontaktlinsenwerte um und unterstützt so dabei, die Anpasszeiten zu verkürzen.

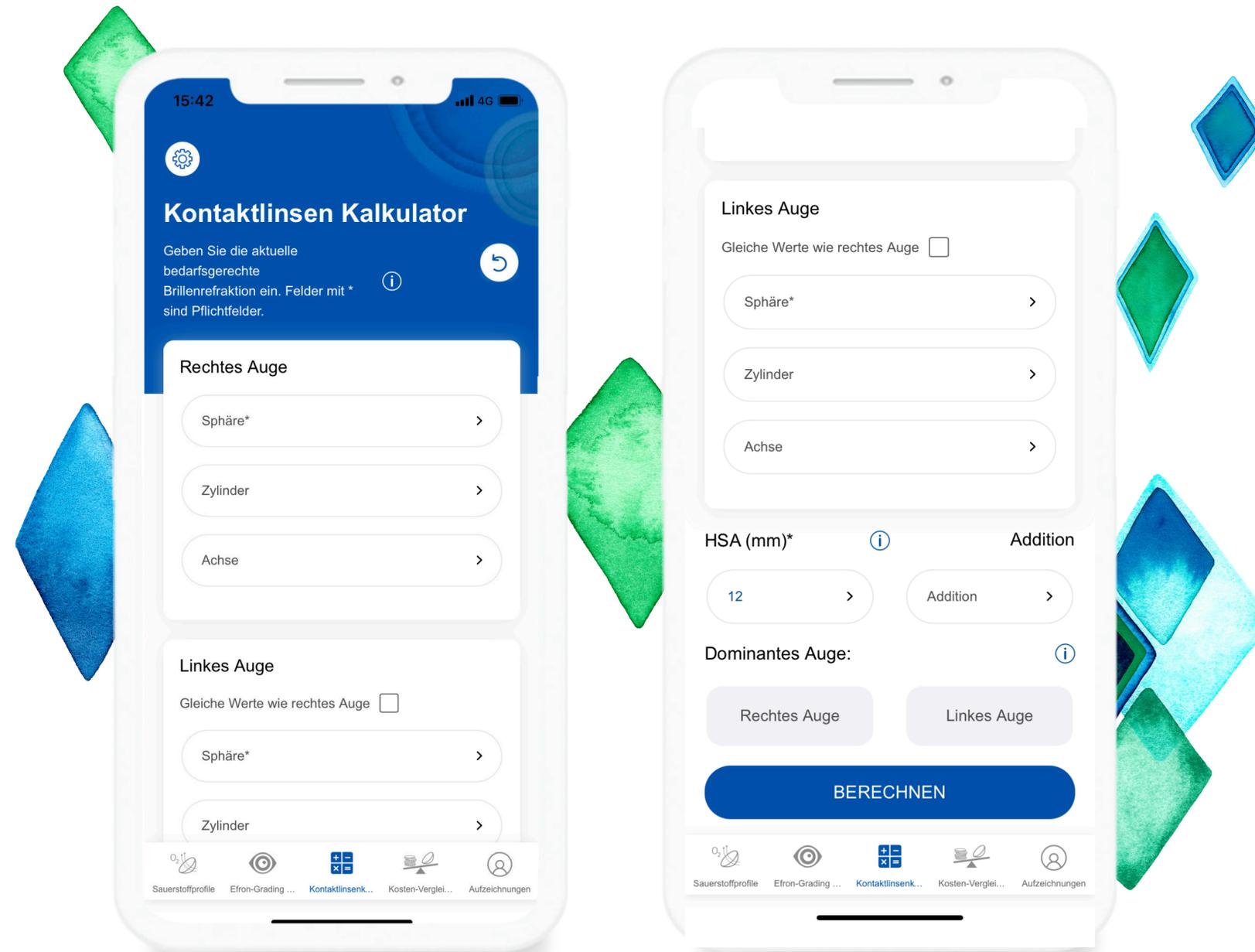



Intelligenter Kontaktlinsenkalkulator

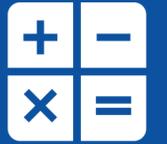

Einstellungen

OptiExpert™ kann
sphärische, torische,
multifokale und torisch-
multifokale Kontaktlinsen
berechnen

Dies ist der Startbildschirm,
wenn Sie OptiExpert™ öffnen.

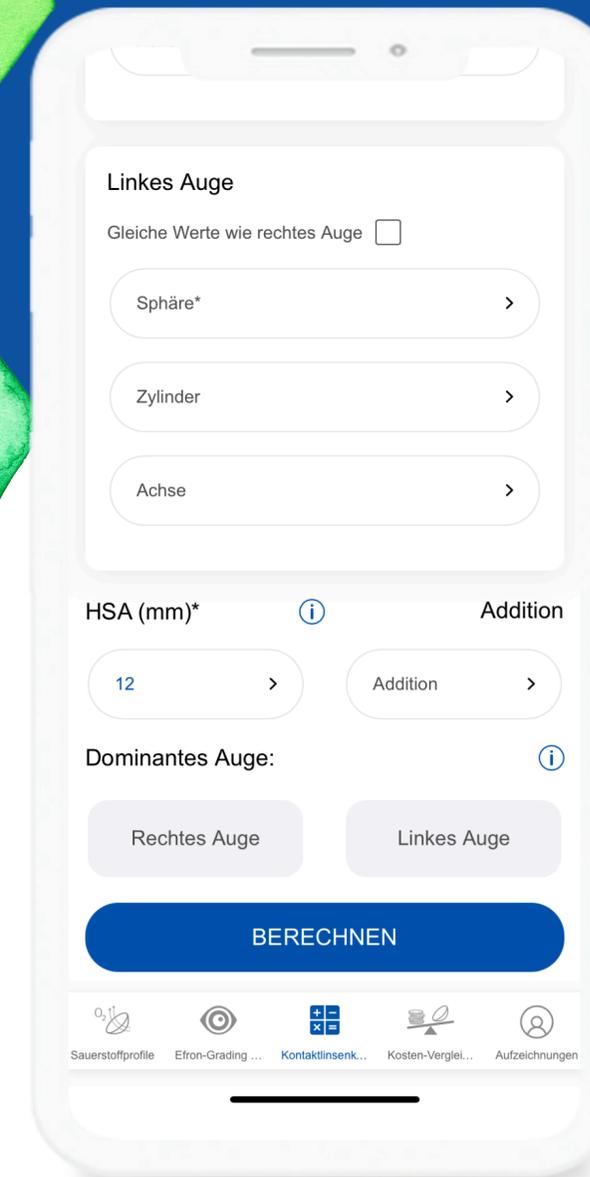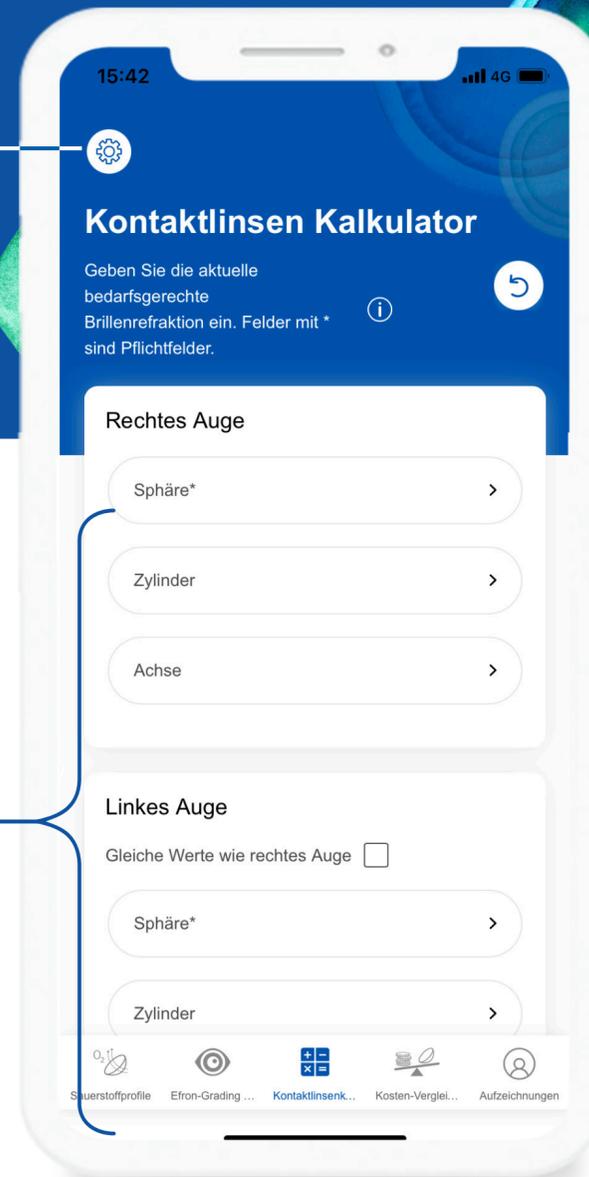

Navigation für die
verschiedenen
Funktionen

Intelligenter Kontaktlinsenkalkulator


Eingabe von Brillenwerten

Für **sphärische** und **torische** Stärken, werden die Brillenwerte entweder für ein oder beide Augen eingegeben.

Für **multifokale** und **torisch-multifokale** Stärken, werden die Brillenwerte für beide Augen eingegeben.

Geben Sie mindestens einen sphärischen Wert für ein Auge ein, um eine Berechnung durchführen zu können. Der durchschnittliche Hornhautscheitelabstand (HSA) ist bereits voreingestellt mit 12 mm – kann aber zwischen 8-15 mm eingestellt werden. Die Schaltfläche „Berechnen“ wird nach erfolgreicher Eingabe aller notwendigen Angaben aktiv.

Wenn ein Zylinderwert ausgewählt wird, muss auch eine Achse ausgewählt werden, bevor eine Berechnung durchgeführt werden kann.

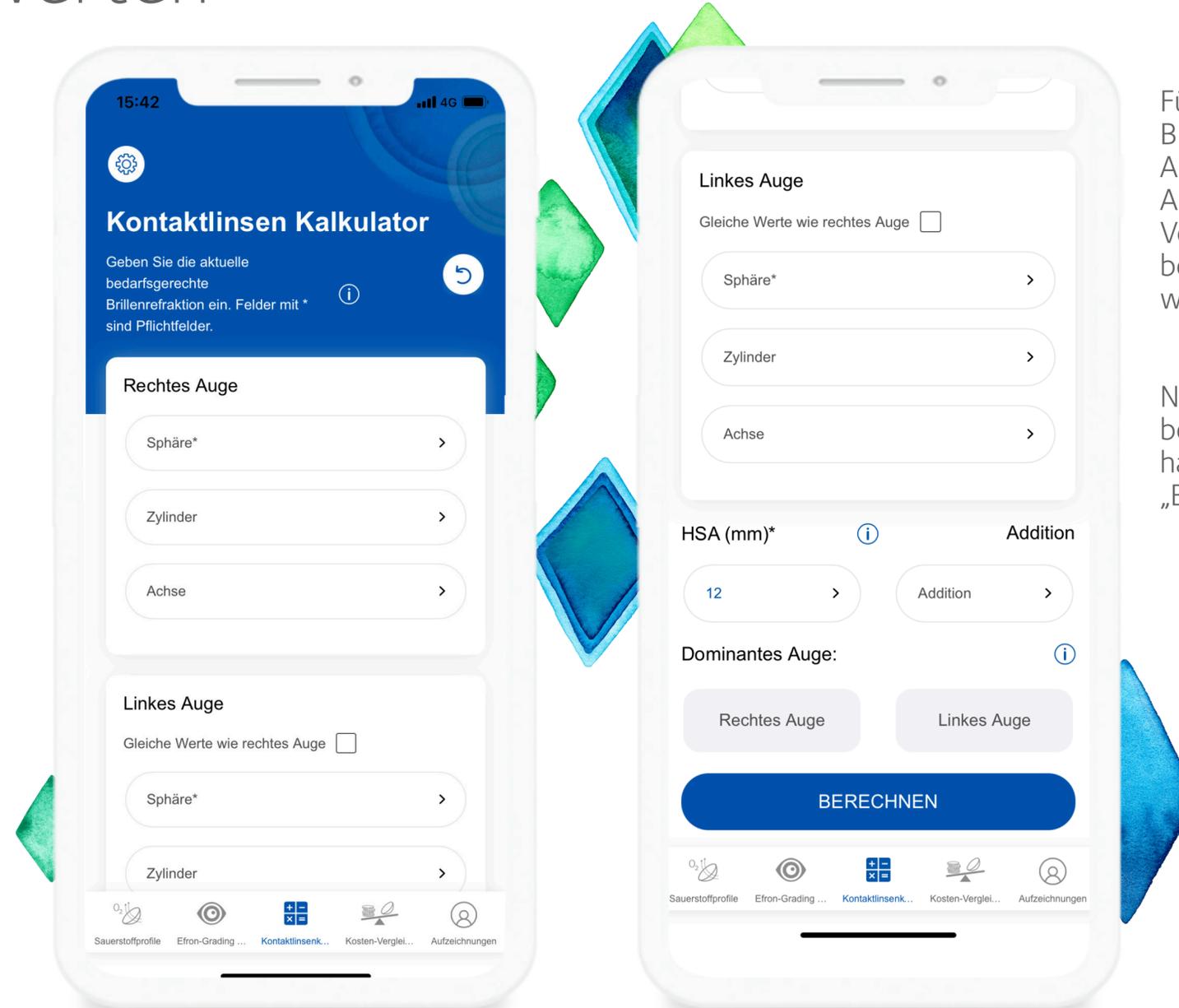


Für **multifokale/torisch-multifokale** Brillenwerte wählen Sie die bedarfsgerechte Addition und das sensorisch ferndominante Auge der Kundin oder des Kunden aus. Vergewissern Sie sich, dass mindestens für beide Augen ein sphärischer Wert eingegeben wurde, bevor Sie fortfahren.

Nachdem Sie die vollständigen, bedarfsgerechten Brillenwerte eingegeben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

Intelligenter Kontaktlinsenkalkulator

Ergebnisse

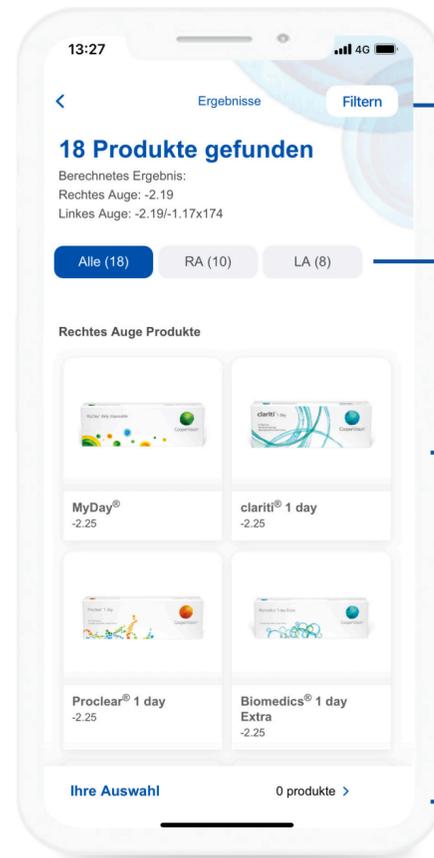

Filtern Sie die Ergebnisse nach Modalität und Kontaktlinsentyp


Wählen Sie aus, ob nur die Ergebnisse für ein Auge oder für beide Augen angezeigt werden sollen

Tippen Sie auf ein beliebiges Produkt für weitere Informationen

Der Ergebnisbildschirm zeigt alle verfügbaren und geeigneten Kontaktlinsen an. Zuerst werden die verfügbaren Einmalkontaktlinsen und anschließend die verfügbaren Monatskontaktlinsen angezeigt. Für einige Ergebnisse kann mehr als ein Kontaktlinsentyp geeignet sein.

Hier werden die ausgewählten Produkte angezeigt

Hinweis: Der Ergebnisbildschirm zeigt die Stärken unter Berücksichtigung des individuellen Hornhautscheitelabstands. Kontaktlinsenspezialistinnen und -spezialisten ist es weiterhin möglich das eigene klinische Urteil einzubinden.

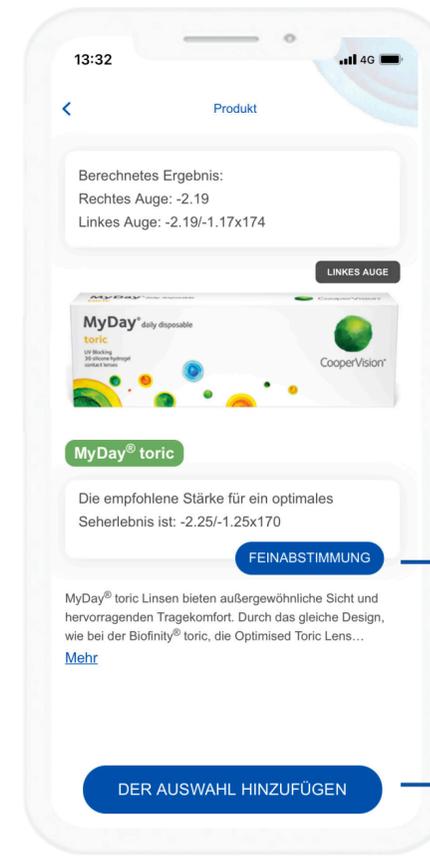

Feinabstimmung


Bei **torischen** Produkten ermöglicht dies eine Optimierung der ursprünglich eingegebenen Werte für die Sphäre oder Achse.

Bei **multifokalen** Produkten ermöglicht dies eine Optimierung der Fern- und Nahstärken.


Produkt zur Auswahl hinzufügen

Intelligenter Kontaktlinsenkalkulator


Feinabstimmung für multifokale und torische Kontaktlinsen

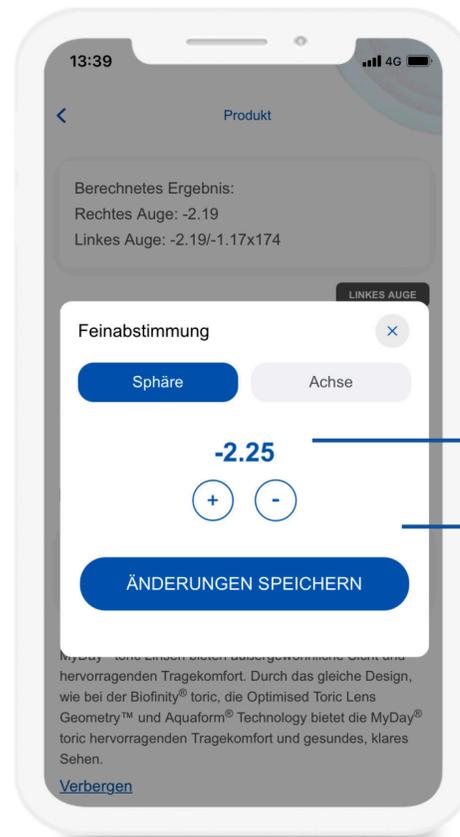

Verwenden Sie die Schaltflächen + und – um die Sphäre oder Achse einer torischen Kontaktlinse anzupassen. Tippen Sie auf „Änderungen Speichern“ und die Kontaktlinsenwerte werden automatisch aktualisiert.

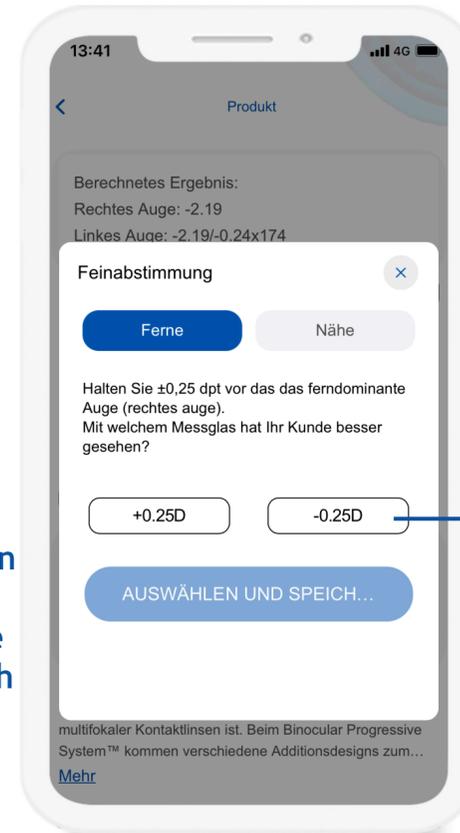



Sie können die Fern und/oder die Nähstärke verfeinern. Tippen Sie auf „Auswählen und Speichern“ und die Kontaktlinsenwerte werden automatisch aktualisiert.

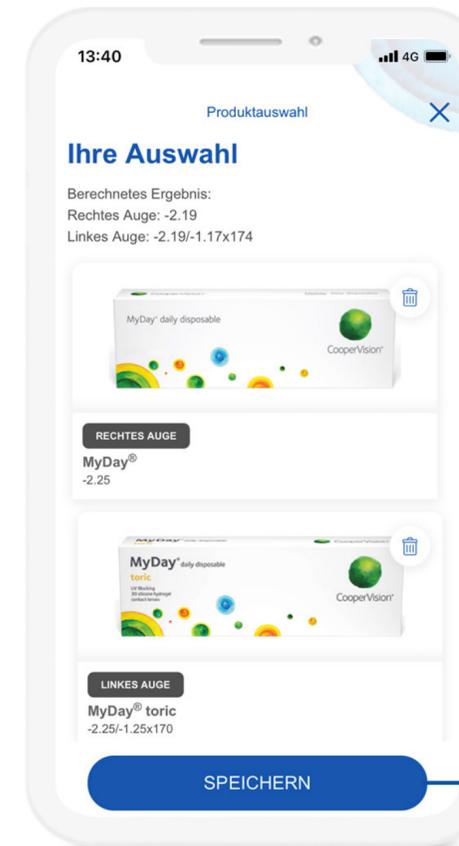


Tippen Sie auf „Speichern“, um Ihre Auswahl in den „Aufzeichnungen“ einer Kundin oder einem Kunden zuzuordnen.

Hinweis: Für eine kleine Anzahl von eingegebenen Stärken können eventuell mehr als eine Empfehlung des gleichen Produkts/der gleichen Produktfamilie angezeigt werden. Zusammen mit dem berechneten Ergebnis gibt dies Kontaktlinsenspezialistinnen und – spezialisten die Freiheit anhand des eigenen klinischen Urteilsvermögen zu entscheiden welches Produkt am besten für die Kundin oder den Kunden geeignet ist.

3. Sauerstoffprofile

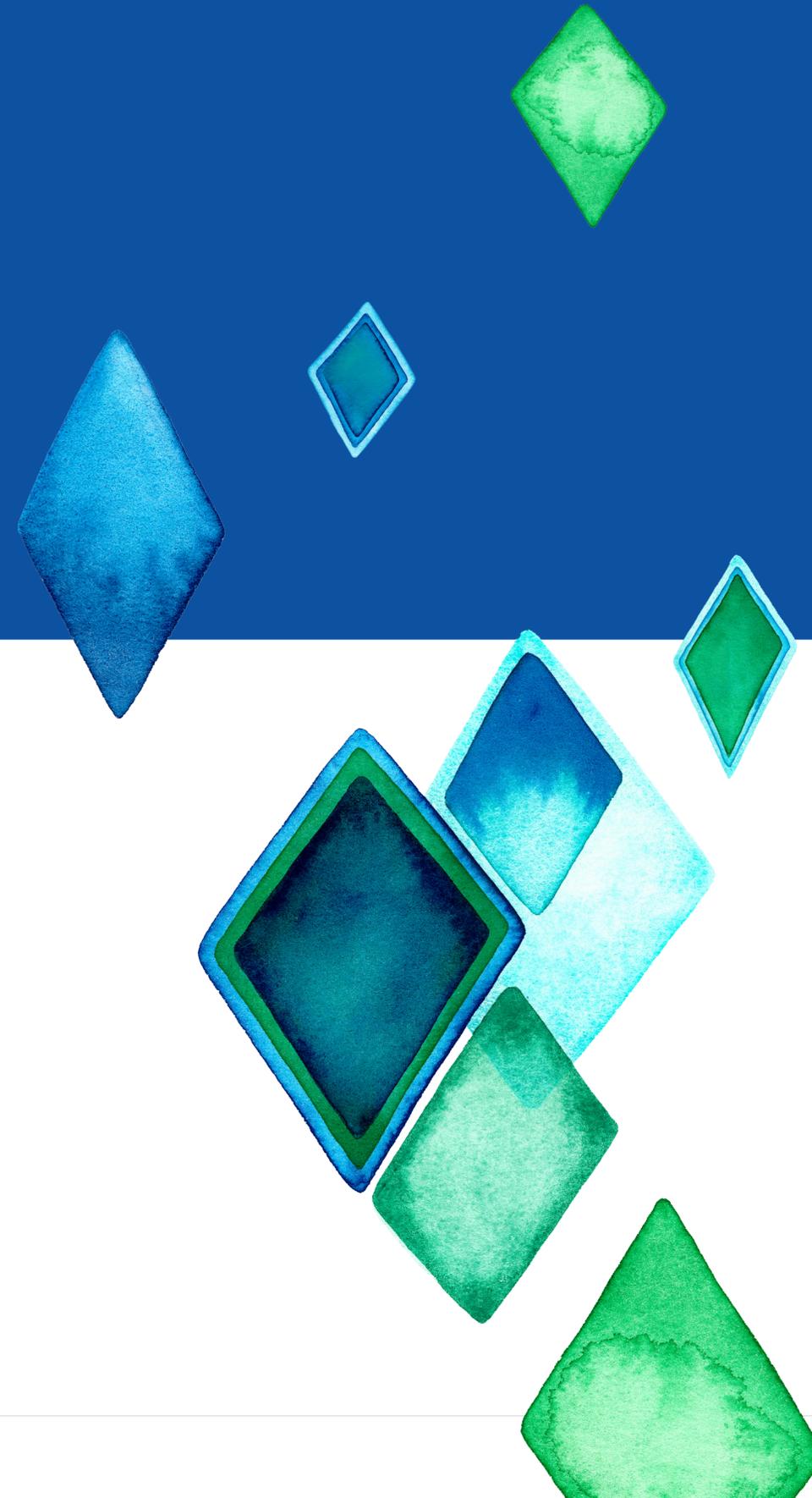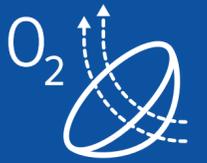


Sauerstoffprofile

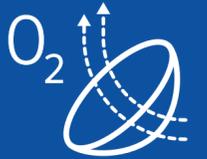


Ein einfaches und effektives Hilfsmittel, das Sie dabei unterstützt das passende Kontaktlinsenmaterial zu ermitteln, abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden.


Die Anwendung enthält 44 Sauerstoffprofile, welche durch Millionen von präzisen Dickenmessungen über das gesamte Kontaktlinsenprofil erstellt werden. Die Dickenmessungen werden in Dk/t-Werte umgewandelt, um exakte Sauerstoffprofile zu erhalten. Sie zeigen die Sauerstoffdurchlässigkeit über die gesamte Kontaktlinse und können aufzeigen, wie die unterschiedlichen Stärken, Designs und Materialien der Kontaktlinse diese beeinflussen.

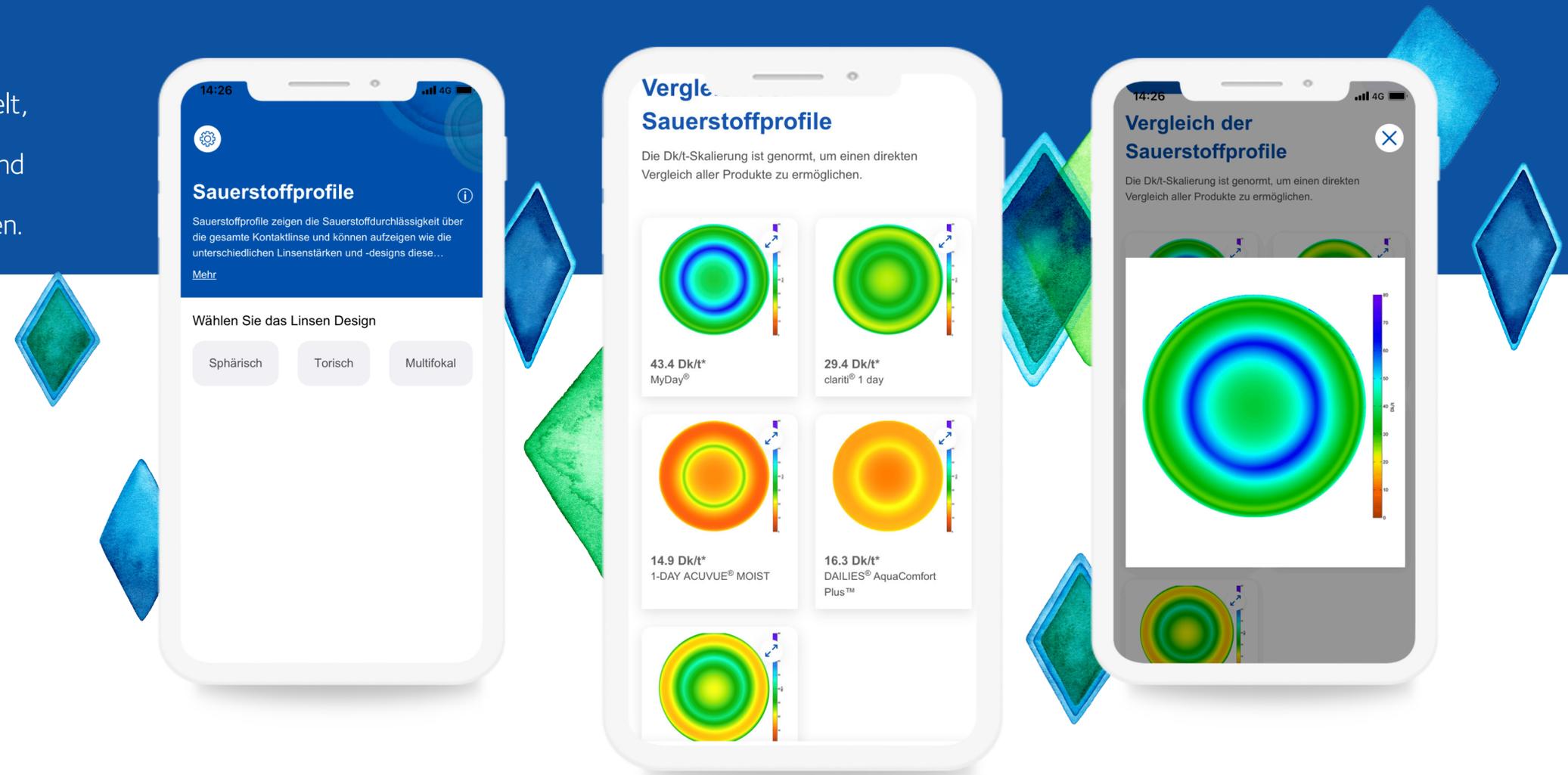


Sauerstoffprofile

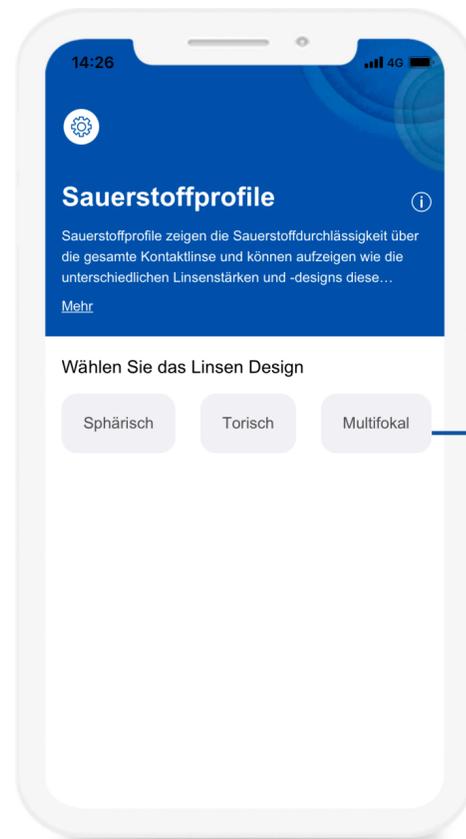

Wählen Sie das Kontaktlinsendesign für Ihre Kundinnen und Kunden

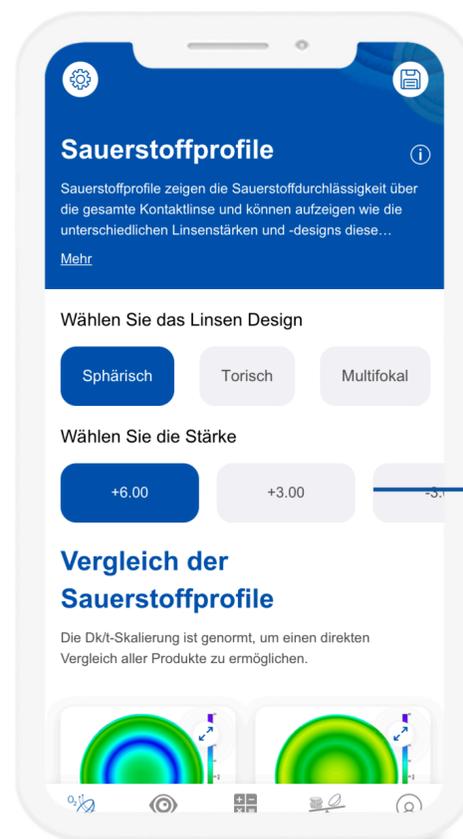


Wählen Sie die Stärke aus, die der Refraktion, mit der Sie sie vergleichen möchten, am nächsten kommt

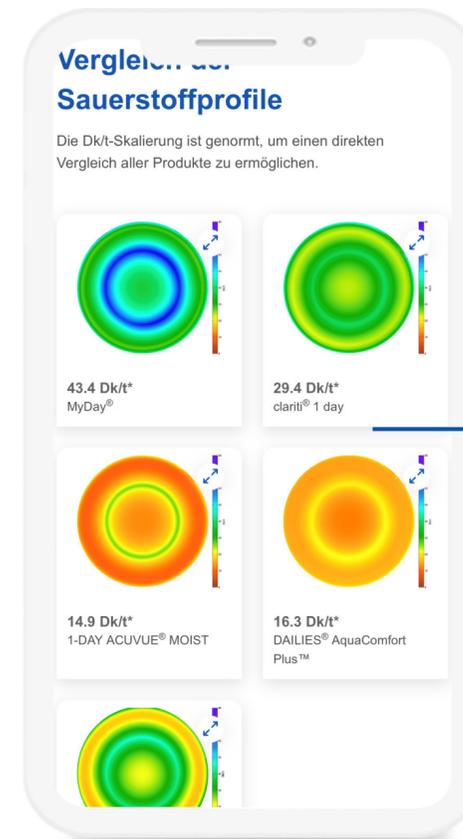

Sie werden die Sauerstoffprofile von bis zu vier Produkten sehen. Dadurch können Sie die Sauerstoffdurchlässigkeit jeder einzelnen Kontaktlinse direkt visuell vergleichen.

4. Efron-Grading Scale

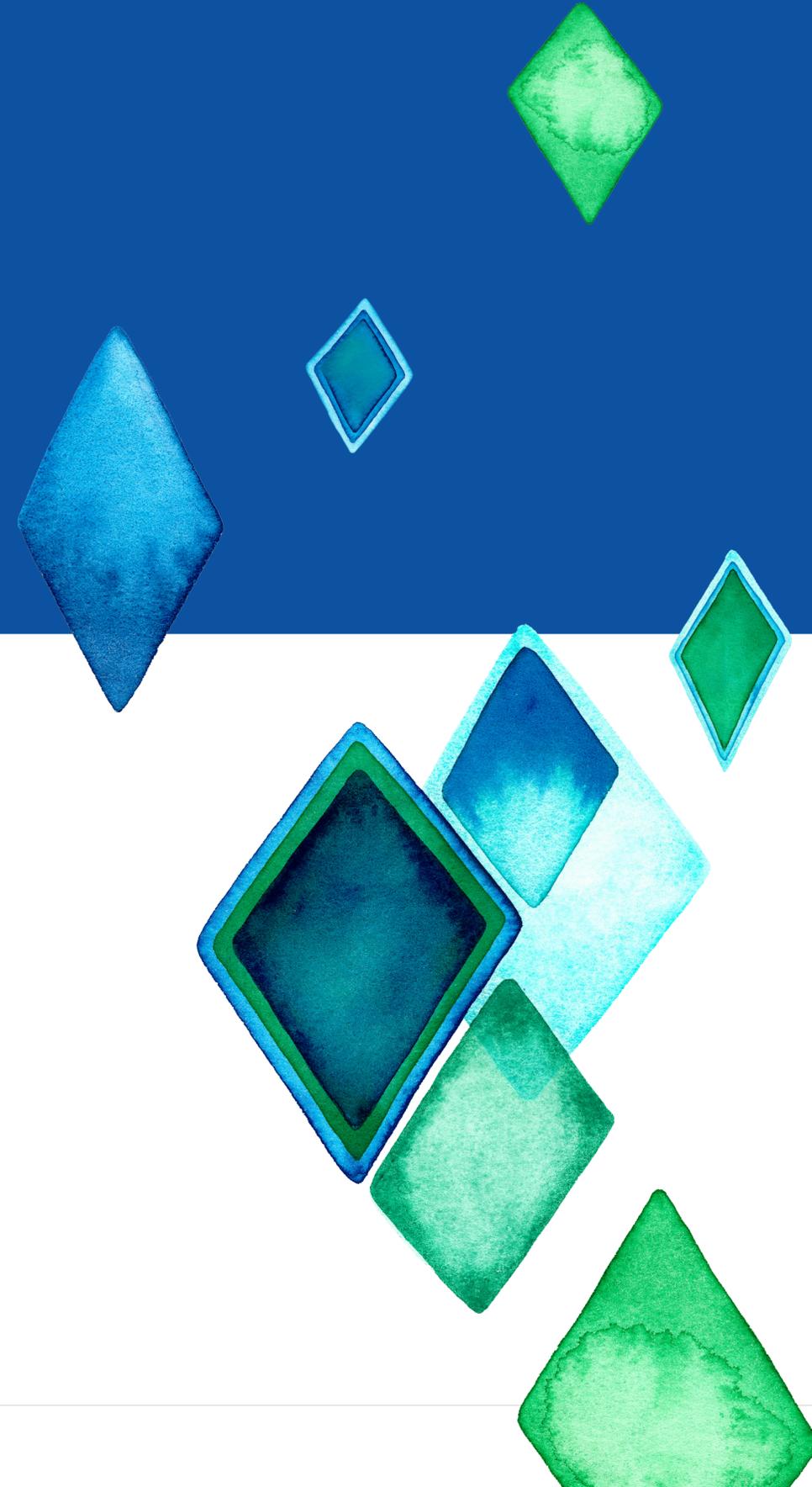


Efron-Grading Scale




Eine schnelle und einfache Übersicht über 16 Augenbefunde, die als Folge des Tragens von Kontaktlinsen entstehen können.

Die zusätzliche Beschreibung unterstützt Sie dabei den Zustand Ihres Kunden oder Ihrer Kundin zu vergleichen und Verlaufskontrollen zu dokumentieren.

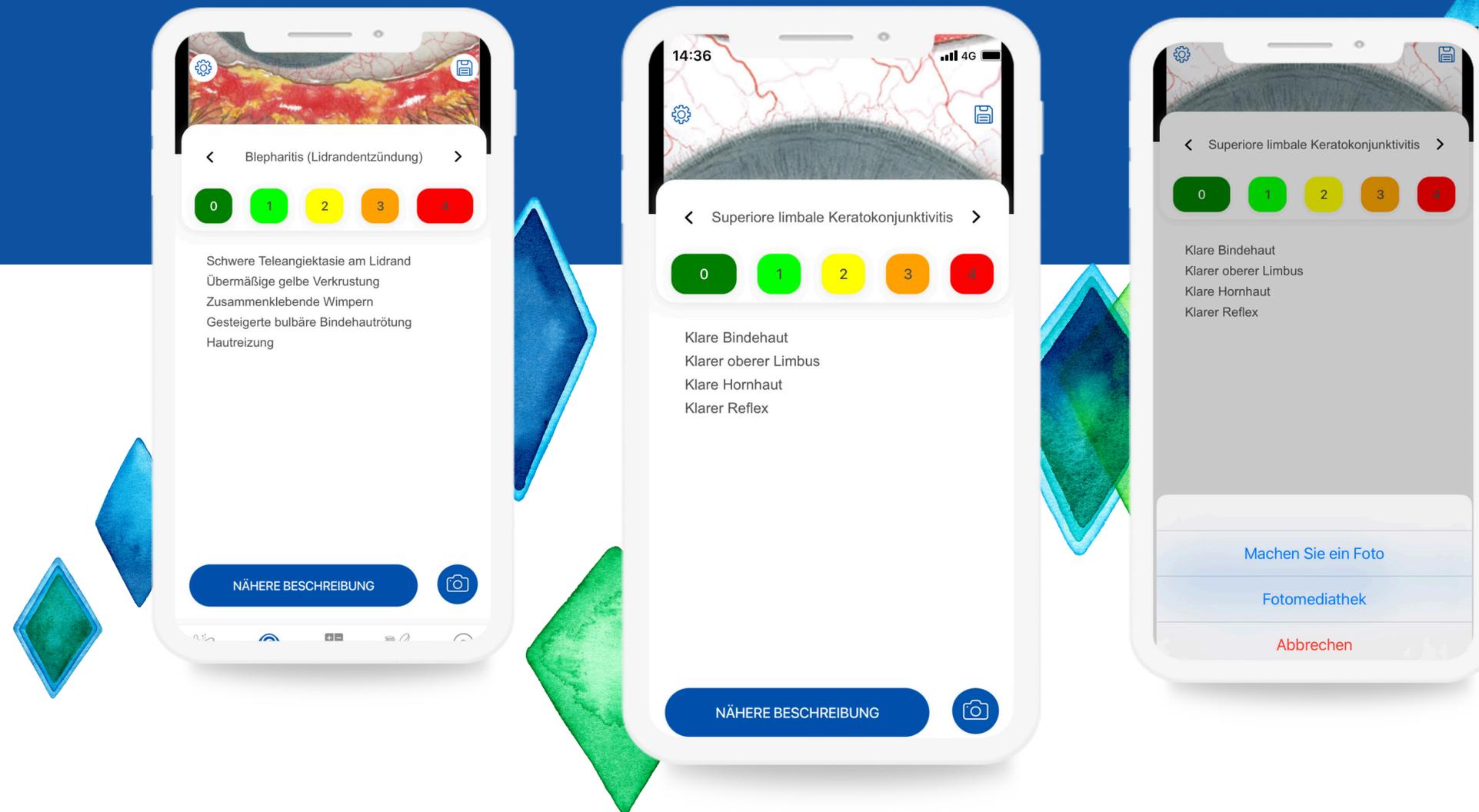

Efron-Grading Scale

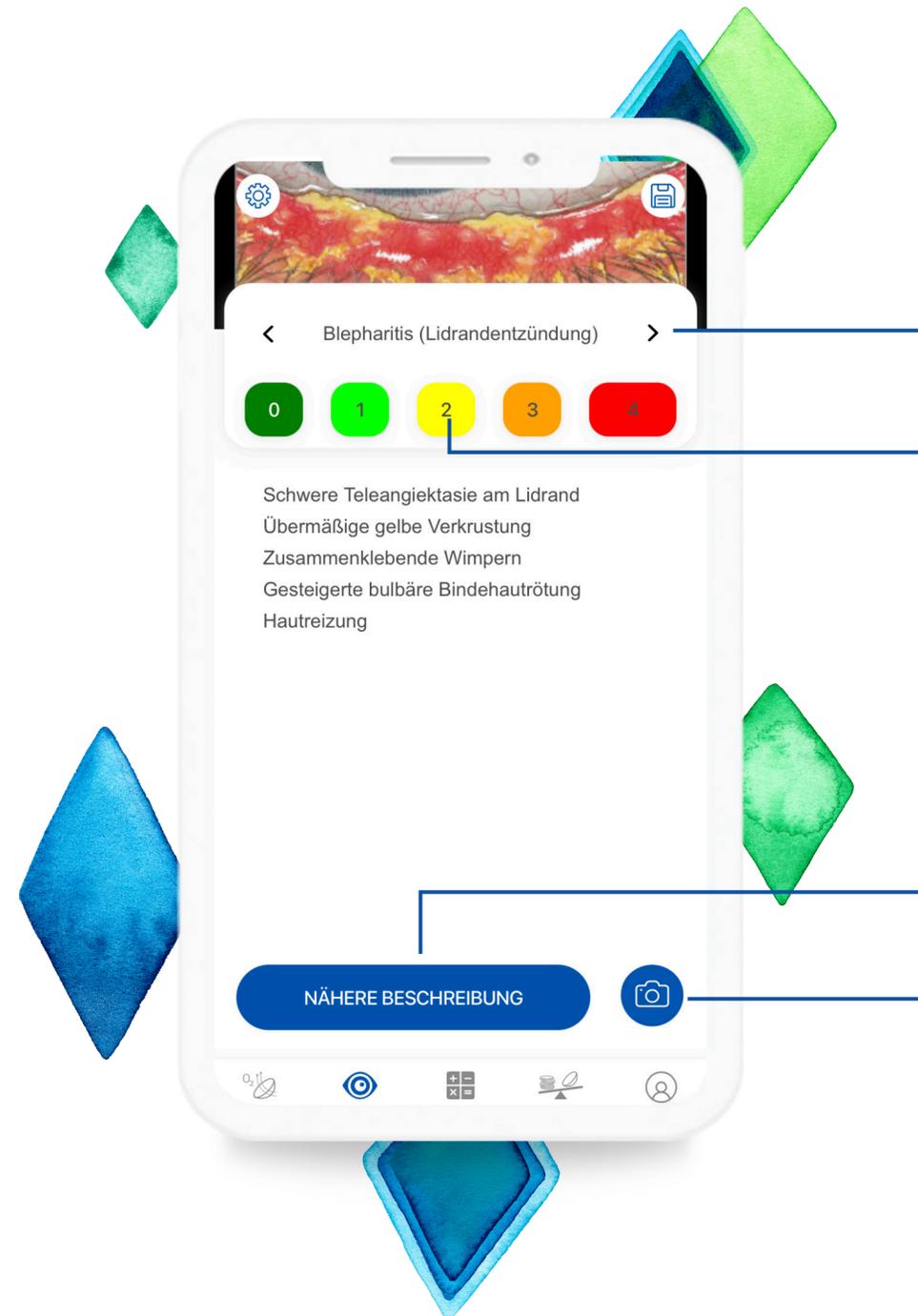

Verwenden Sie die Pfeile, um durch die 16 verschiedenen Augenbefunde zu blättern

Tippen Sie auf die Zahlen 0-4, um den Schweregrad des Augenbefundes zu ändern

Tippen Sie auf „Nähere Beschreibung“, um noch mehr über einen Befund zu erfahren

Nehmen Sie ein Foto auf, um die Auffälligkeiten des Kundenauges direkt mit den Grafiken vergleichen zu können.

Efron-Grading Scale

Auffälligkeiten
des Kundenauges
direkt vergleichen




Nehmen Sie ein neues Foto vom Auge ihrer Kundin oder ihres Kunden auf

Verwenden Sie ein bereits vorhandenes Bild aus der Bibliothek Ihres Geräts

Sobald Sie auf das Kamera-Symbol tippen, können Sie die Efron-Grading Scale von OptiExpert™ verwenden, um den Zustand des Auges der Kundin oder des Kunden zu vergleichen. Das Bild wird unter der Referenzabbildung angezeigt. Blättern Sie durch die verschiedenen Augenbefunde, bis Sie ein passendes Beispiel gefunden haben. Tippen Sie auf das Diskette-Symbol oben rechts auf dem Produktbildschirm, um Ihre Auswahl in den „Aufzeichnungen“ einer Kundin oder einem Kunden zuzuordnen.

5. Kosten-Vergleichsrechner

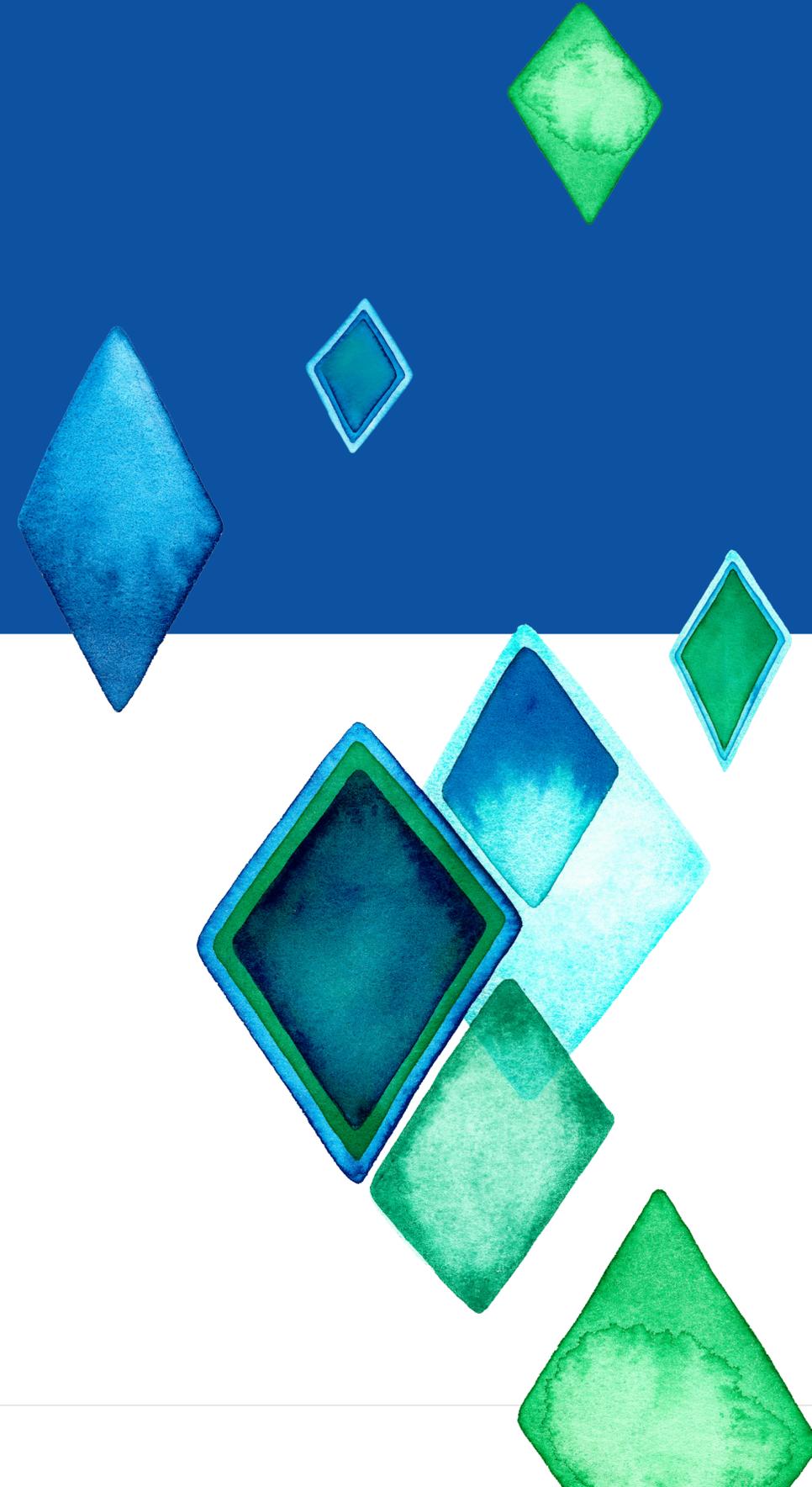

Kosten-Vergleichsrechner



Ermöglicht Ihnen, Kostenvergleiche auf informative und professionelle Weise transparent zu diskutieren.

Es gibt drei Methoden, Kontaktlinsen zu vergleichen.

- Ein gleiches Kontaktlinsen-Paar - wobei das Material und das Design für das rechte und linke Augen identisch sind
- Ein unterschiedliches Kontaktlinsen-Paar - wobei das Material und das Kontaktlinsendesign für das rechte und linke Auge unterschiedlich sind
- Eine einzelne Kontaktlinse - wobei nur eine Kontaktlinse (z.B. Mono-Vision) zur Korrektur benötigt wird.

The image displays three smartphone screens illustrating the steps of the cost comparison calculator:

- Screen 1: Ich vergleiche...** Shows three selection options: "Ein gleiches Kontaktlinsen-Paar", "Ein unterschiedliches Kontaktlinsen-Paar", and "Eine einzelne Kontaktlinse". Each option includes a brief description and a "WEITER" button.
- Screen 2: Aktuelle Kontaktlinse** Shows configuration options for the selected lens type, including brand (CooperVision®), material (Proclear®, Sphärisch, Monatslinsen, Hydrogel), wear schedule (1 Monatsbedarf, z.B. 2 Monatslinsen), and wear frequency (Tragehäufigkeit pro Woche wählen). It also includes checkboxes for whether the user knows the price for lenses and care products.
- Screen 3: Ergebnisse** Shows the calculated results for "clariti® 1 day". It lists the recommended lens price (€ 1.00), the current lens price (€ 1.27), and the price advantage (€ 0.27).

Kosten-Vergleichsrechner

Vergleich von Kontaktlinsen

Wenn Sie eine Monatskontaktlinse ausgewählt haben, geben Sie die gesamten Kosten für die Kontaktlinsen und das Pflegemittel ein, falls Sie wissen, wieviel dieses kostet. Andernfalls geben Sie nur die Kosten für die Kontaktlinsen ein - Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die entsprechende Option auf dem Bildschirm auswählen. (Wenn nur die Kosten für die Kontaktlinsen eingegeben werden, dann werden bei der Berechnung durchschnittliche Kosten für das Pflegemittel verwendet - Kann auf dem Bildschirm angezeigt werden, indem Sie auf das entsprechende Kästchen tippen). Tippen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

The image shows a smartphone screen with a contact lens calculator app. The screen displays the following elements:

- Time: 14:57, Signal strength, 4G, and battery icons at the top.
- Back arrow and title: "Aktuelle Kontaktlinse" with an information icon.
- Brand selection: Two buttons, "CooperVision®" (highlighted in blue) and "Andere".
- Product selection: A scrollable list with options: "Proclear®", "Sphärisch", "Monatslinsen", and "Hydrogel".
- Quantity selection: "1 Monatsbedarf, z.B. 2 Monatslinsen".
- Wearing frequency: "Tragehäufigkeit pro Woche wählen".
- Price selection: Two checkboxes. The first is checked: "Der Verkaufspreis für Kontaktlinsen und Pflegemittel ist mir bekannt". The second is unchecked: "Der Verkaufspreis nur für Kontaktlinsen ist mir bekannt".
- Bottom text: "Verkaufspreis für Kontaktlinsen".

Decorative blue and green diamond shapes are overlaid on the screen, with lines pointing to specific features.

Wählen Sie, ob die derzeitigen Kontaktlinsen von CooperVision® oder einer anderen Marke sind

Wählen Sie das Produkt aus (bei den Marken von CooperVision werden das Design, die Modalität und das Material automatisch vervollständigt)

Design

Modalität

Material


Menge

Tragehäufigkeit pro Woche

Verkaufspreis


Kosten-Vergleichsrechner

Vergleich von Kontaktlinsen

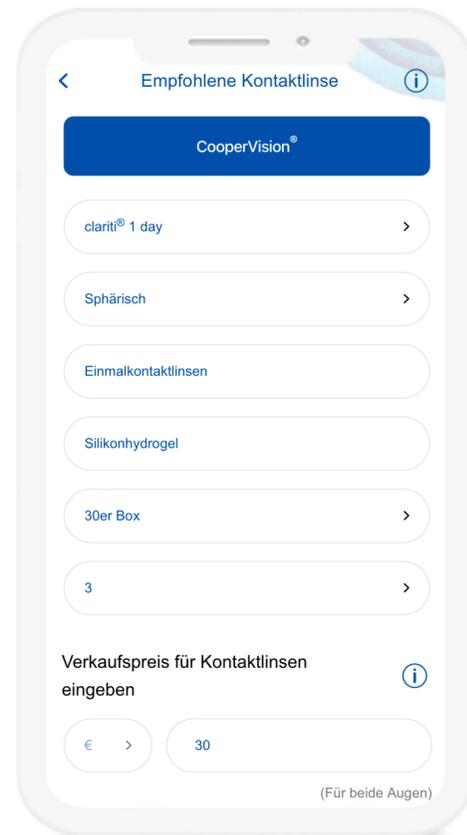


Geben Sie alle Informationen über die empfohlenen Kontaktlinsen für die Kundin oder den Kunden ein.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“

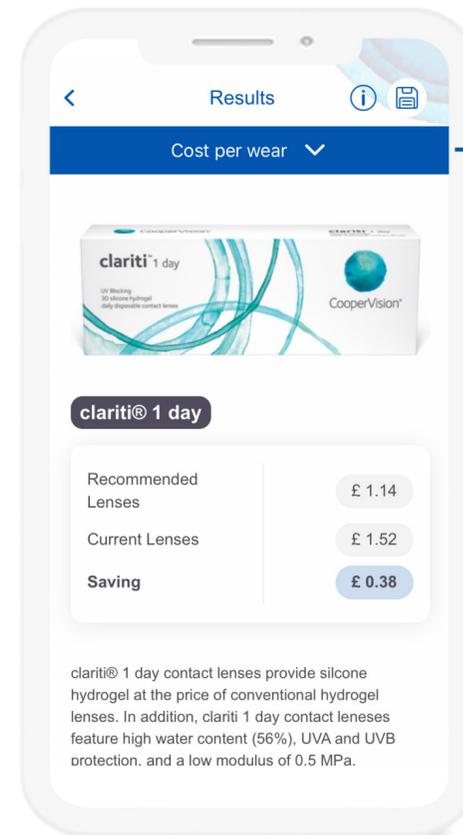


Verändern Sie den Vergleich in „Kosten pro Tag“, „Kosten pro Woche“ oder „Kosten pro Monat“

Auf dem Ergebnisbildschirm werden die Kosten der empfohlenen Kontaktlinsen mit denen der derzeit verwendeten Kontaktlinsen verglichen, und die jeweilige Einsparung oder Differenz angezeigt.

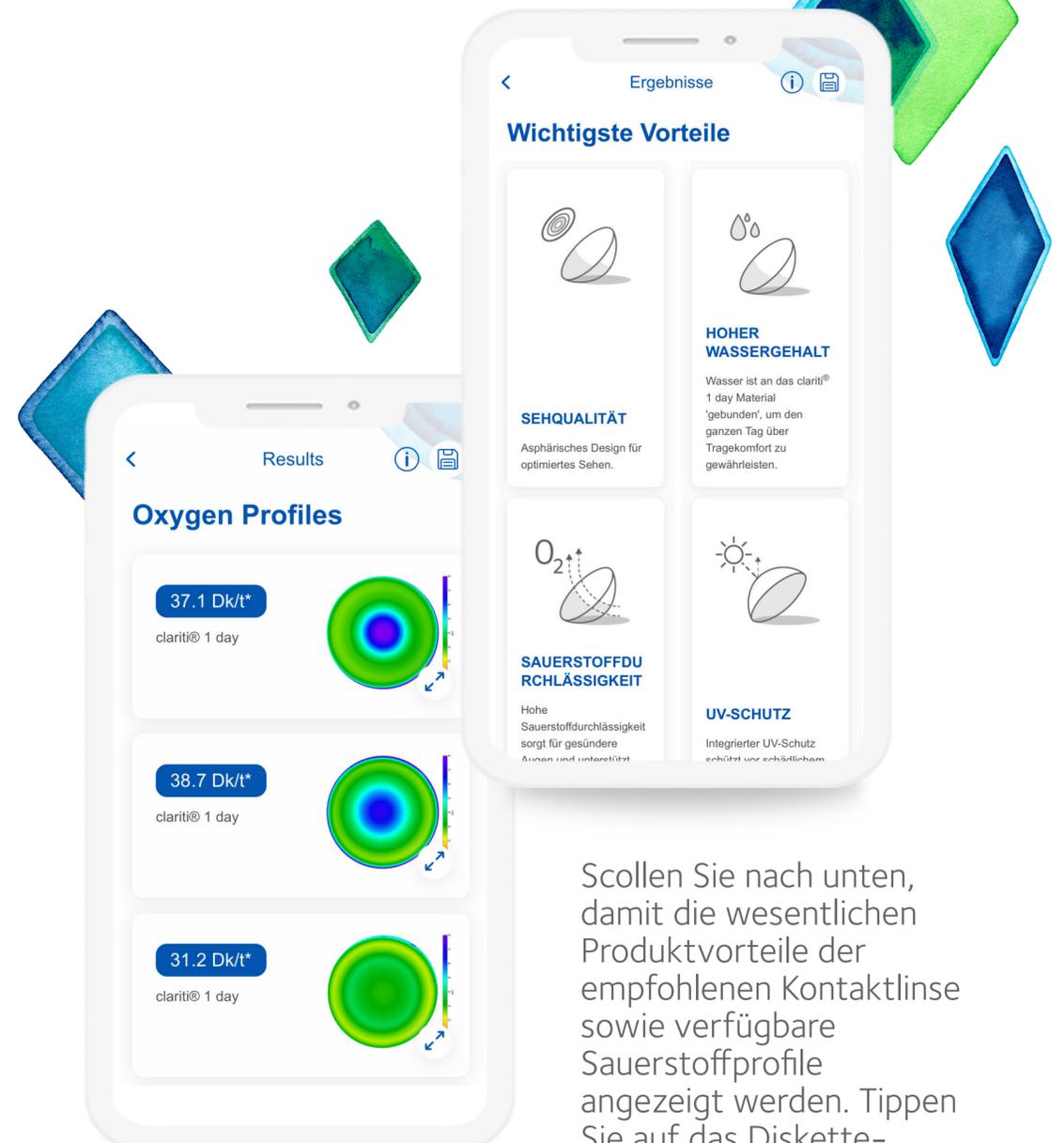

Scollen Sie nach unten, damit die wesentlichen Produktvorteile der empfohlenen Kontaktlinse sowie verfügbare Sauerstoffprofile angezeigt werden. Tippen Sie auf das Diskette-Symbol oben rechts auf dem Produktbildschirm, um Ihre Auswahl in den „Aufzeichnungen“ einer Kundin oder einem Kunden zuzuordnen.

6. Aufzeichnungen

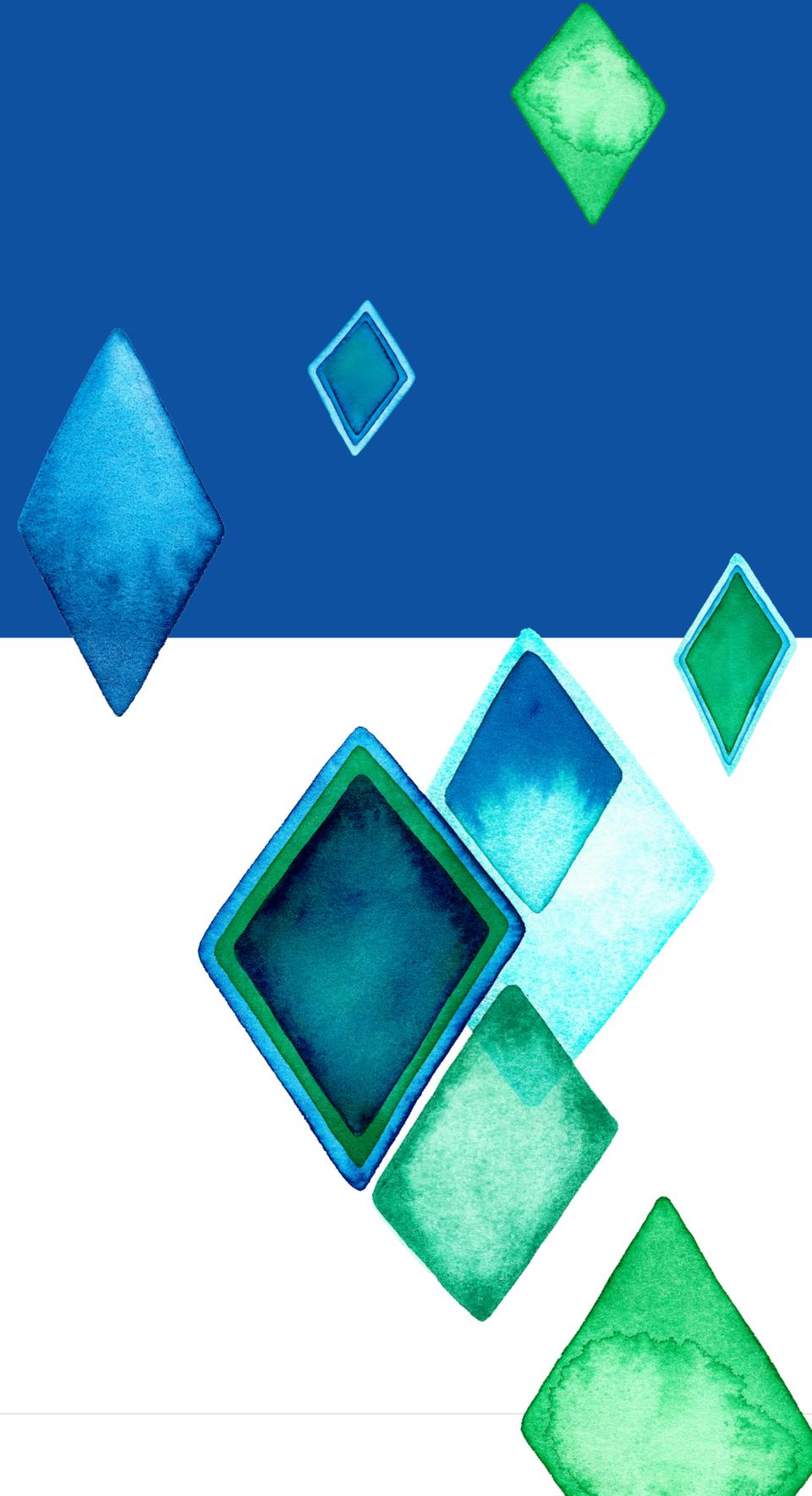


Aufzeichnungen



Ermöglicht die Nachverfolgung von Empfehlungen an Kundinnen und Kunden. Vorhandene Aufzeichnungen von Kundinnen und Kunden können abgerufen oder gelöscht sowie neue Aufzeichnungen erstellt werden.



Überall in OptiExpert™, wo Sie das Diskette-Symbol sehen, können Sie einen Datensatz erstellen oder speichern.

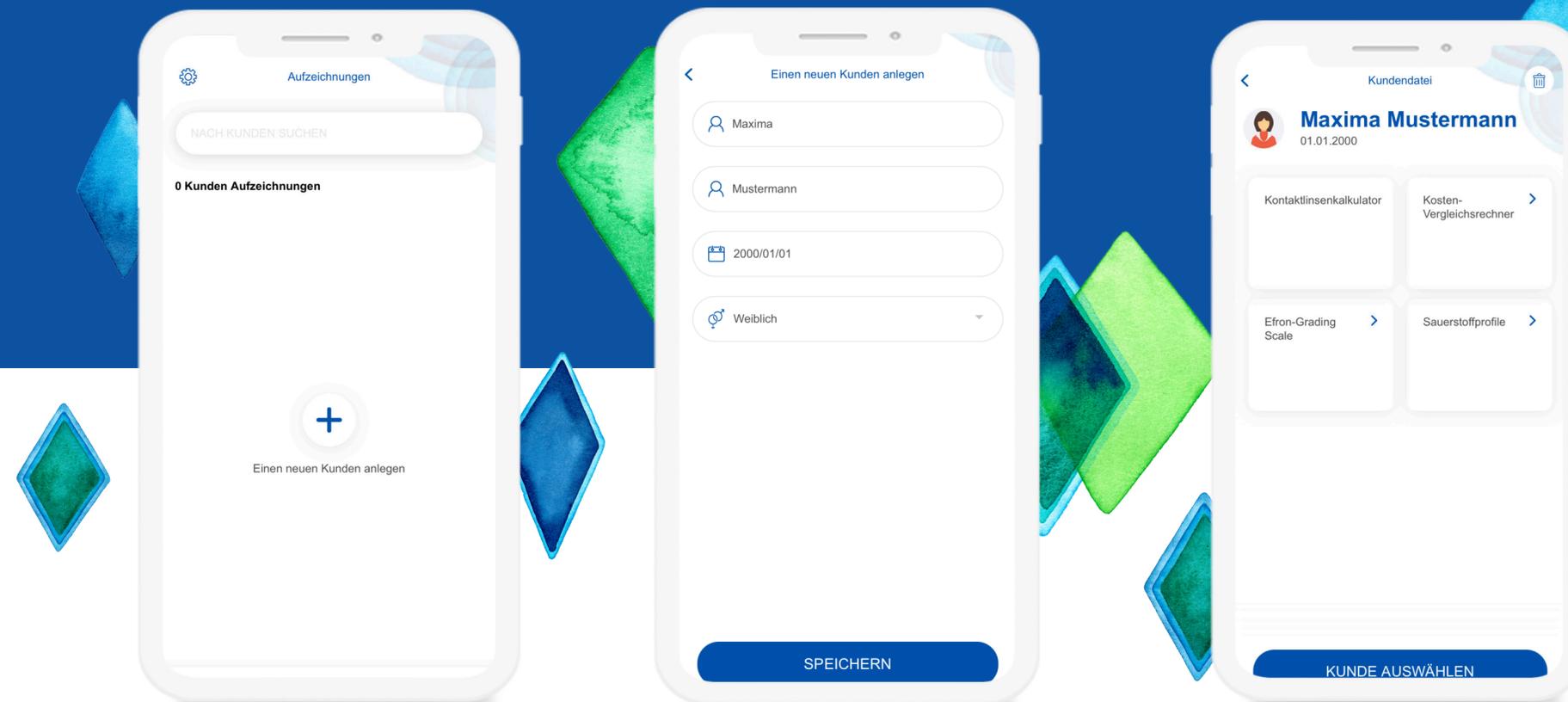


Tippen Sie auf das „+“ Symbol, um eine neue Aufzeichnung für eine Kundin oder einen Kunden zu erstellen.

Geben Sie den Namen, das Geburtsdatum und das Geschlecht der Kundin oder des Kunden ein. Tippen Sie „Speichern“, wenn Sie fertig sind.


Wählen Sie eine vorhandene Kundin oder einen vorhandenen Kunden aus, um die vorliegenden Datensätze anzuzeigen und abzurufen.

Tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol in der Aufzeichnung der Kundin oder des Kunden, wenn der Datensatz gelöscht werden soll.

Einstellungen

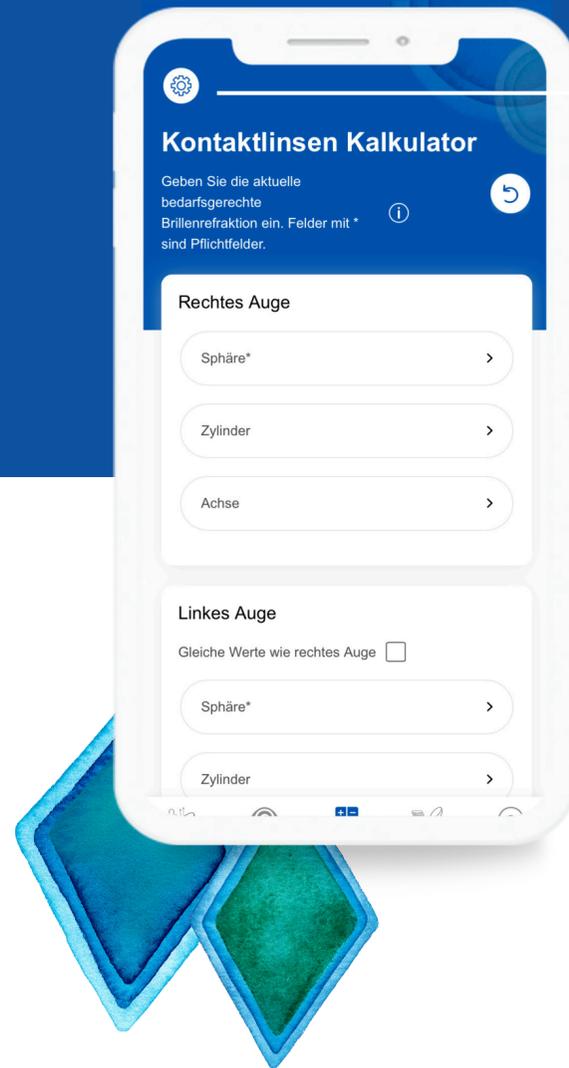

Tippen Sie auf das Symbol, um in die Einstellungen zu gelangen

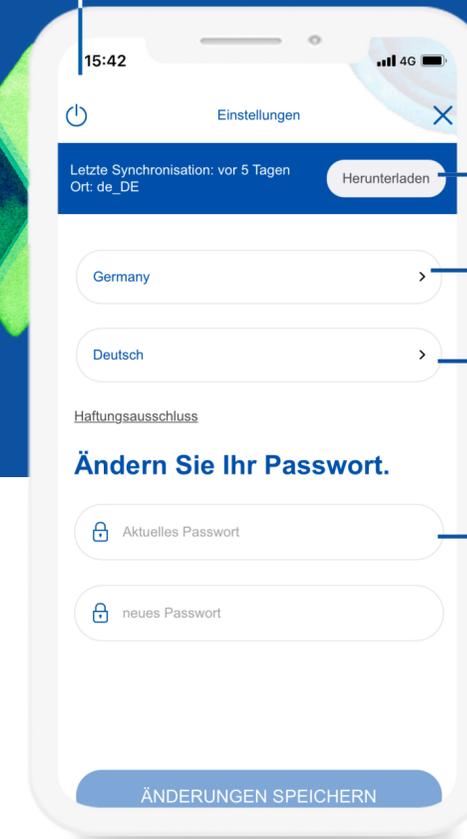

Melden Sie sich von der App ab

Synchronisieren Sie mit dem aktuellen Produktkatalog von CooperVision. OptiExpert™ macht dies automatisch jede Woche. Vorausgesetzt, dass die App mit einer aktiven Internetverbindung geöffnet wurde

Einstellungen für Land und Sprache anpassen

Ändern Sie Ihr Passwort

Wenn Sie sich bei OptiExpert™ abmelden, müssen Sie Ihr Passwort erneut eingeben, wenn Sie die App das nächste Mal öffnen. Wenn Sie sowohl Ihr Passwort als auch die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage vergessen, gibt es aus Sicherheitsgründen keine Möglichkeit, wieder Zugriff auf die App zu bekommen. In diesem Fall sollten Sie sie löschen und erneut herunterladen.