

Anpassleitfaden – Proclear® 1 day multifocal

3 Schritte zum Anpasserfolg

Tipps aus der Praxis

Ferne: soviel Plus wie möglich, so wenig Minus wie nötig. Messen und kontrollieren Sie Fern- und Nahsicht immer unter binokularen Bedingungen bei eingeschalteter Raumbeleuchtung.

Ist die Sehleistung zufriedenstellend, geben Sie die Kontaktlinsen ab, damit der Kontaktlinsenträger diese in seinem gewohnten Umfeld erleben kann.

Neuanpassung:

Schritt 1 Bestimmung des ferndominanten Auges und des BSG

Schritt 2 Linsenauswahl und -anpassung

Berücksichtigen Sie den persönlichen Bedarf des Kunden und die HSA-Umrechnung

		ferndominantes Auge	nicht dominantes Auge
Brillenaddition	Bis +1,00	BSG +0,50 dpt	BSG +0,50 dpt
	Ab +1,25	BSG +0,50 dpt	BSG +1,25 dpt
	Beispielwerte R/L-2,00 mit ADD +1,75	Beispielwert -1,50 dpt	Beispielwert -0,75 dpt

basierend auf der neuen, aktualisierten Anpassempfehlung

Schritt 3 Bewertung der ersten Probelinse

Toleranzzeit: ca. 15 Minuten. Die Beurteilung des Seherfolges sollte unter realen Bedingungen (nicht im Anpassraum) erfolgen, mit Sehaufgaben des Alltags: z.B. Straßenschilder, Armbanduhr oder Handy.

Überprüfen Sie das Sehen bei eingeschalteter Raumbeleuchtung.

Führen Sie nur dann eine Stärkenüberprüfung oder -modifikation durch, wenn das Sehen für den Kunden nicht tolerierbar ist!

Optimierung der Ferne: Addieren Sie - 0,25 dpt zum ferndominanten Auge.

Optimierung der Nähe: Addieren Sie + 0,25 dpt zum nicht dominanten Auge.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Anpassleitfaden in 3 Schritten“, XSM 2878



Anpassleitfaden – Proclear® 1 day multifocal

Hydrogel-Einmalkontaktlinsen mit bewährter PC-Technology™, die bei Symptomen von Trockenheit während des Kontaktlinsentragens den Tragekomfort verbessern können und hervorragendes Sehen in allen Entfernung bieten.

Die Vorteile der Proclear 1 day multifocal auf einen Blick:

- asphärisches Design mit Nahwirkung im Zentrum.
- entwickelt mit einem Stärkenverlauf:
 - ermöglicht Fernsicht ohne Einschränkung.
- höhere Verstärkung der Nähe auf dem nicht dominanten Auge:
 - optimiert das Sehen in der Nähe und der mittleren Distanz und gewährleistet dadurch binokulares Sehen.

Produktinformationen:

Proclear® 1 day multifocal

Sphäre: (0,50 dpt) -10,00 bis -6,50
(0,25 dpt) -6,00 bis plan
(0,25 dpt) +0,25 bis +6,00

Additionen: Single-Power-Design

Basiskurve: 8,70 mm

Durchmesser: 14,20 mm



OptiExpert

Fachkompetenz im Smartphone-Format



Die OptiExpert App™ von CooperVision® mit dem modernen Multifokalrechner. Im App Store und auf Google Play erhältlich.

Passwort: biofinity

Aufbau Single-Power

Das Design für eine einfache Anpassung

Das Design der Proclear 1 day multifocal ist so aufgebaut, dass es jedes Auge separat versorgt und dabei das binokulare Sehen bewahrt:

- Verschiedene Stärken unterstützen die Nähe, ohne dabei die Fernsicht zu beeinträchtigen

